



Protocol


Bedpan Liner – CB1




Zie procedures en technical datasheet

Definitie	<p>Dit is een disposable product voor de opvang van urine en ontlasting. Het bestaat uit een waterproof zak met treksluiting en is voorzien van een (geur)absorberende inlegger.</p>
Informatie Wanneer gebruikt u de Bedpan Liner – CB 1?	<p>Voor alle patiënten die bedpannen gebruiken, met name voor de volgende doelgroepen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gezonde personen. - Patiënten geïnfecteerd met of drager van BRMO zoals ESBL, MRSA, CPE en VRE. - Gevallen van Clostridium difficile infecties. - Gevallen van acute Gastro-enteritis. - Personen met een verstandelijke of geestelijke beperking. - Patiënten die radiotherapie of chemotherapie ondergaan. - Andere patiënten die niet in staat zijn naar het toilet te gaan of moeite met lopen hebben. - In het ziekenhuis: afd. Oncologische dagbehandeling, Afdeling urologie (bij onderzoeken), pre en post operatief, SEH etc.
Hoe te gebruiken	<ol style="list-style-type: none"> 1. Open de doos. 2. Rol de eerste bedpan liner zak af en scheur hem af langs de perforatie. 3. Open de zak, plaats hem goed over de bedpan inclusief steel en vouw hem over de rand. Draai de bedpan om en trek de koorden aan. Draai de bedpan weer om. 4. Zorg ervoor dat de absorberende inlegger op de bodem ligt. (bij sticktest achteraf toevoegen) 5. Laat de patiënt urineren of stoelgang hebben in privacy. (bij voorkeur cliëntgebonden bedpan gebruiken). 6. Wacht enige tijd totdat de inlegger in gel is veranderd. 7. Sluit de zak (bij verdenking van een infectie met extra beleid om aerosolvorming te voorkomen) door aan de treksluiting te trekken en knoop de zak dicht zowel bovenop als om de hals (dubbele knoop). 8. Gooi de zak weg bij het reguliere afval of volgens het afvalstoffenbeleid van de instelling. Bij een sticktest de inlegger achteraf toevoegen.
Voorzorgsmaatregelen	<p>Pas handhygiëne toe en draag handschoenen. Draag een halterschort of een jasschort met lange mouw bij infecties als BRMO (conform WIP richtlijnen Persoonlijke beschermingsmiddelen, handhygiëne, BRMO, MRSA indien dit aan de orde is).</p>
Onderhoud van de bedpan (Conform WIP richtlijn Urinelozing en Stoelgang)	<p>Na gebruik van een cliëntgebonden herbruikbare po met zak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reinig direct handmatig bij géén zichtbare verontreiniging - Reinig en desinfecteer direct handmatig: <ul style="list-style-type: none"> • direct bij zichtbare verontreiniging • po: bij opheffen cliëntgebonden status - Gooi de po weg: <ul style="list-style-type: none"> • Als ondanks (herhaalde) handmatige reiniging en desinfectie, de po zichtbaar verontreinigd blijft of kalkaanslag bevat.

Gebruiksaanwijzing

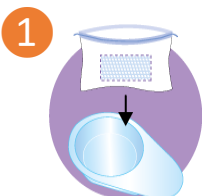

1
Plaats de zak in de bedpan inlegger op de bodem

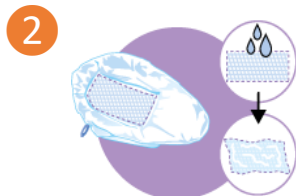

2
De bedpan is nu klaar voor gebruik



3
Verwijder de zak als de urine of ontlasting is omgezet in gel (tot 450 ml), sluit de zak en gooi de zak bij het reguliere afval volgens het afvalstoffenbeleid van de instelling.
NIET DOOR HET TOILET SPOELEN.



4
Desinfecteer de handen conform de WIP richtlijn.



22, Avenue Aristide Briand
94111 Arcueil Cedex
Frankrijk



Exclusief gedistribueerd door:

OmniMedical
Lingewei 9 | 4004 LK Tiel
Tel.: 0344 651 444
info@omnimedical.nl | www.omnimedical.nl
www.cleanis.nl

