



1- Product

- 1.1- Presentatie** Bedpan liner (ondersteekzak) met treksluiting en super absorberende inlegger. Absorptiecapaciteit: 450 ml.
- 1.2- Omschrijving**
- Ovangzak: LDPE, met blauwe PEHD treksluiting. Afmetingen: 59 x 38 cm, 37µ.
 - Super absorberende inlegger: Non-woven structuur en super absorberende polymeren (SAP), 24 x 13 cm met een absorptiecapaciteit van 450 ml.

2- Gebruik

- 2.1- Gebruikersinstructie**
1. Open de doos.
 2. Rol de eerste bedpan liner zak af en scheur hem af langs de perforatie.
 3. Open de zak, plaats hem goed over de bedpan inclusief steel en vouw hem over de rand. Draai de bedpan om en trek de koorden aan. Draai de bedpan weer om.
 4. Zorg ervoor dat de absorberende inlegger op de bodem ligt.
 5. Wacht circa 1 minuut na gebruik totdat de inlegger (± 450 ml) in gel is veranderd.
 6. Sluit de zak door aan de treksluiting te trekken. Knoop de zak zowel bovenop de zak dicht als nog een keer extra met de sluiting om de hals.
 7. Gooi de zak weg bij het reguliere afval of volgens protocol van de instelling (bv INCO afval)
- 2.2- Verwijdering** Gooi de zak weg bij het reguliere afval of bij het klinische afval indien de patiënt een infectie heeft. Dit product voldoet aan de regelgeving inzake milieuvervuilingsrisico's bij verbranding en het laat geen gechloreerde derivaten vrij wat kan uitmonden in dioxine.
- 2.3- Voorzorg** Disposable product. Niet meer dan één keer te gebruiken. Bij oogcontact grondig spoelen met water en raadpleeg een arts indien nodig. Bij inslikken onmiddellijk een arts raadplegen. Buiten het bereik van kinderen bewaren.

3- Regelgeving

- 3.1- Conformiteit:** Voldoet aan de Europese regelgeving 93/42/CEE voor medische hulpmiddelen Class I - CE
- 3.2- Identificatie:** Elk product is voorzien van een lot nummer.
- 3.3- Douane:** 5603149090 (Volgens Europese regelgeving).
- 3.4- Veiligheid:** Dit product wordt volgens de Europese regelgeving niet gezien als gevaarlijk. Safety data sheet op aanvraag.

4- Verpakking

Ref.	Verpakking	Omdoos	Pallet
Artikelnummer CB1	Rol met 20 zakken 200 x 115 x 115mm 0,74kg	18 verpakkingen met 20 zakken (360 zakken totaal) 413 x 359 x 366mm 15kg	30 dozen - 540 rollen(10.800 zakken) 80 x 120 x 198cm 465kg (incl. pallet) (5 lagen van elk 6 dozen)

• Registered International brand, patents and designs - Dimensions, weight, volume: +/- 5% - Version: NL 09082018



ISO Certified
9001/13485

CLEANIS S.A.S.
Exclusief gedistribueerd
door:

OmniMedical
Lingewei 9 | 4004 LK Tiel
Tel. 0344 651 444

info@omnimedical.nl
www.omnimedical.nl

Website:
www.cleanis.nl