

Reiniging van EHOB drukreducerende producten

Reinigingsvoorschriften TPU producten (hospital range):

EHOB producten worden gefabriceerd volgens de hoogste kwaliteitsnormen. Het materiaal is voorzien van een antibacterieel additief. Dit bestanddeel voorkomt de groei van *Klebsiella pneumoniae*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, Methicillin-Resistant *Staphylococcus Aureus* (MRSA), *Salmonella choleraesuis*, *Enterococcus faecium*, *Bacillus subtilis*, *Clostridium difficile*, *Candida albicans*, en *Aspergillus niger*. Het additief kan niet worden verwijderd uit het materiaal door wassen of desinfecteren.

EHOB beveelt de onderstaande reinigingsmethoden aan:

- Dagelijkse inspectie en reiniging met water en zeep of een standaard, neutraal PH schoonmaakmiddel wordt aanbevolen. Reinigingsdoekjes met een neutrale PH waarde kunnen ook worden gebruikt.
- Zichtbare vervuiling (Feces, bloed, urine etc.) moet worden verwijderd met bovenstaande middelen of een oplossing met maximaal 20% chloor. Maak het product na reiniging goed droog voor hergebruik.
- Sterk vervuilde producten mogen niet worden hergebruikt en moeten volgens geldende voorschriften worden vernietigd.

Voorzorgsmaatregelen:

Onze producten moeten met zorg worden gereinigd om de luchtkamer niet te beschadigen. Scherpe of schurende schoonmaakmiddelen mogen niet worden gebruikt.

Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen zoals wasbenzine, alcohol oplossingen hoger dan 5% en petroleumderivaten.

Het product moet altijd worden afgespoeld met water en goed worden gedroogd.

Het product mag niet in een standaard ziekenhuis wasmachine worden gereinigd.

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met uw distributeur of met:

Paul Mersel, Regional Sales Manager EHOB



EHOB[®]
prevention • treatment • solutions

Lichtenauerlaan 102-120
3062 ME ROTTERDAM

+31(0)10 78 92 404
+31(0)6 50815895
paul.mersel@ehob.com
www.ehob.com

Paul Mersel
Regional Sales Manager

Real solutions for prevention and treatment of pressure ulcers