

Type installatie Melag autoclaven

1. Standalone installatie

U vult de autoclaaf zelf met gedemineraliseerd water van [10 liter](#) of [1 liter](#). Het water dient u **zelf** te lozen door middel van de siliconenslang, deze wordt standaard erbij geleverd. Aansluiting van de autoclaaf is op de wandcontactdoos (wcd), bij voorkeur een onbelaste electriciteitsgroep. Zie *installatie checklist autoclaaf stand alone* voor de benodigde voorzieningen.

2. Waterafvoer installatie

U vult de autoclaaf zelf met gedemineraliseerd water van [10 liter](#) of [1 liter](#). Het verbruikte water wordt **automatisch** geloosd. Aansluiting van de autoclaaf is op de sifon en de wandcontactdoos (wcd), bij voorkeur een onbelaste electriciteitsgroep. U dient ervoor te zorgen dat een gat, bij voorkeur boven de sifon, op het blad gereed is waar u de autoclaaf wilt plaatsen. Zie *installatie checklist autoclaaf* voor de benodigde voorzieningen.

Bij waterafvoer installatie heeft u ook de [Melag afvoerslag](#) nodig.

3. Waterafvoer en watertoevoer installatie

Uw autoclaaf wordt **automatisch** gevuld met kraanwater, gefilterd en geloosd. Aansluiting van de autoclaaf is op een standaard wasmachine kraan, de sifon en de wandcontactdoos (wcd), bij voorkeur een onbelaste electriciteitsgroep. U dient ervoor te zorgen dat een gat, bij voorkeur boven de sifon, op het blad gereed is waar u de autoclaaf wilt plaatsen. Zie *installatie checklist autoclaaf* voor de benodigde voorzieningen.

Bij waterafvoer en watertoevoer installatie heeft u ook de [Melag connection set MelaDem](#), [Melag brektank MelaDem](#) en [Melag MelaDem 40](#) nodig.

Let op! De prijs is exclusief plaatsingskosten en onderhoudskosten. Informeer naar de voorwaarden.