



Toepassingsmethoden

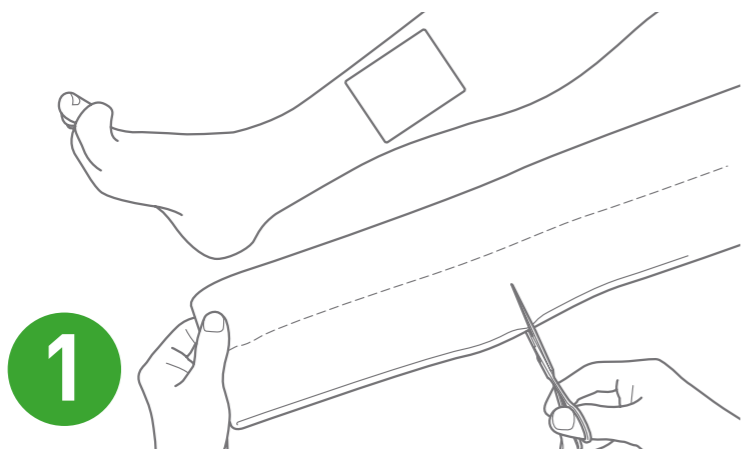


1

Tubifast 2-Way Stretch is een lichtgewicht buisverband dat kan worden gebruikt voor het fixeren van wondverbanden op dermatologische plekken of als bescherming onder gipsverband. Om Tubifast 2-Way Stretch aan te brengen heeft u alleen een schaar en 2 handen nodig. Knip de benodigde lengte af.

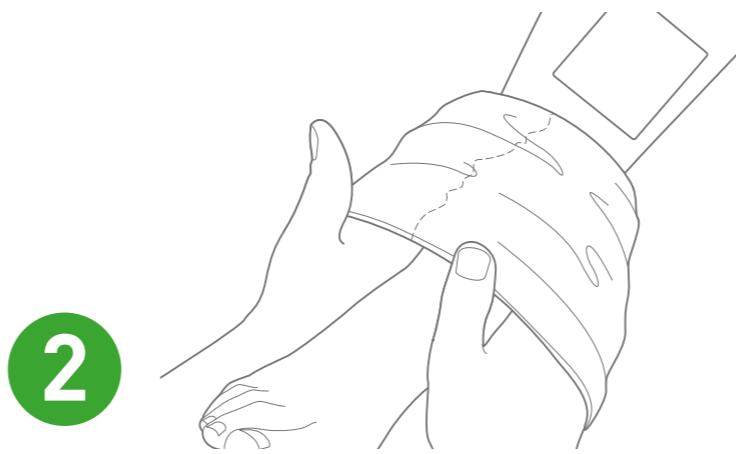

2


Rek het stuk Tubifast 2-Way Stretch uit over de handen en over het aangetaste lichaamsdeel als het bedoeld is om een wondverband op zijn plaats te houden. Als het bedoeld is om een compleet lichaamsdeel te bedekken, wordt Tubifast 2-Way Stretch simpelweg aangetrokken als een kous.

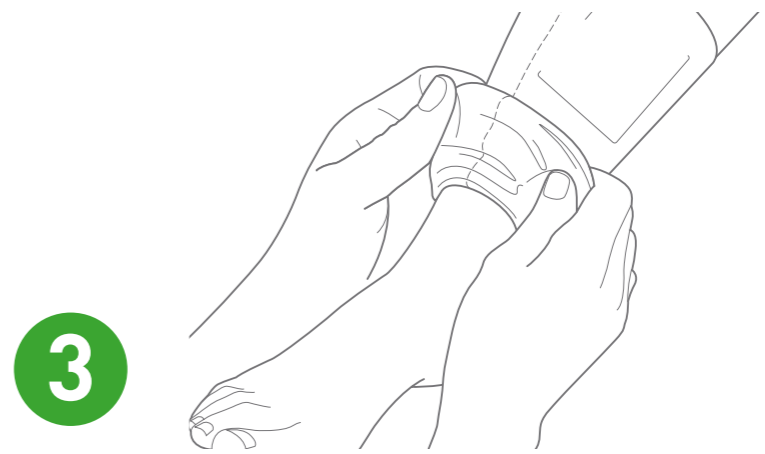

3


Tubifast 2-Way Stretch bedekt het verband en geeft het een lichte, gelijkmatige druk zonder te knellen. Het kan worden aangebracht in een dubbele laag, met name over de gewrichten voor extra stevigheid. Tubifast 2-Way Stretch is snel, eenvoudig en comfortabel. Het blijft op zijn plaats en knelt niet.

Hand

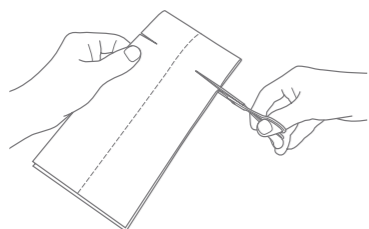


1

Meet vanaf de middenhandsbeenderen tot even voorbij de pols, verdubbel deze lengte en knip af. Knip 2 gaten op ongeveer 5 cm vanaf de vouw.

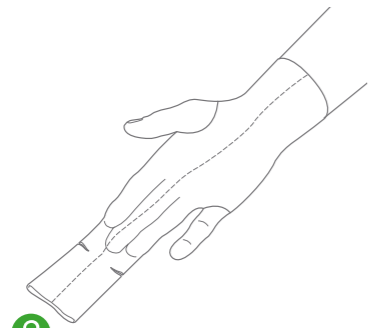

2


Trek Tubifast 2-Way Stretch over hand en pols, waarbij de duim en pink door de geknipte gaten komen.

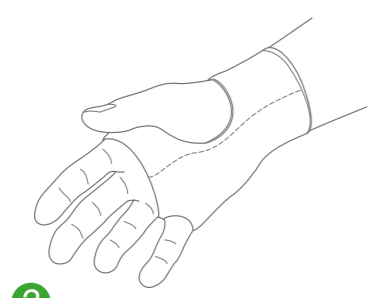

3


Vouw het resterende verband om, waarbij de middelste drie vingers door het gat komen. Het buis- en wondverband zitten nu stevig vast.

Als hemd

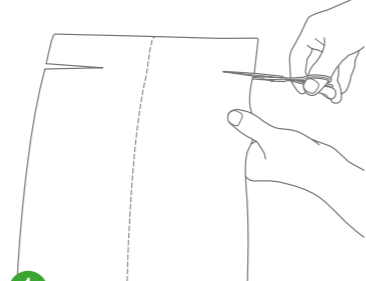


1

Kies een stuk Tubifast 2-Way Stretch van de juiste afmeting van de romp en meet vanaf de bovenkant van de schouder tot de taille. Knip af, knip daarna aan beide zijden gaten in van 4-5 cm, ongeveer 10 cm vanaf de bovenkant.

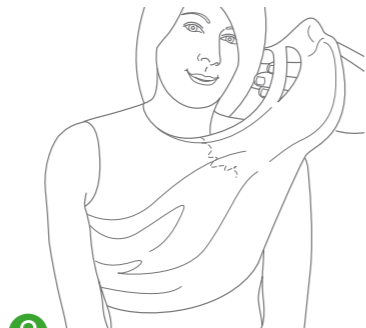

2


Trek de Tubifast 2-Way Stretch over het hoofd, waarbij de armen door de geknipte gaten komen.

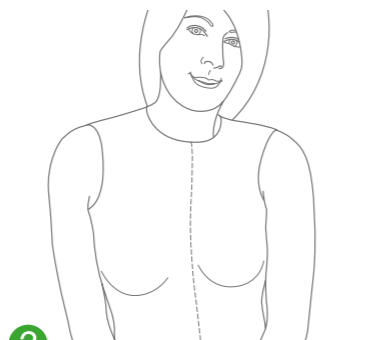

3


De Tubifast 2-Way Stretch wordt in zo'n positie getrokken dat het een hemd vormt. Deze toepassing is ideaal om wondverbanden op de borst of rug op hun plaats te houden, en voor dermatologisch gebruik.

Als hemd met mouw

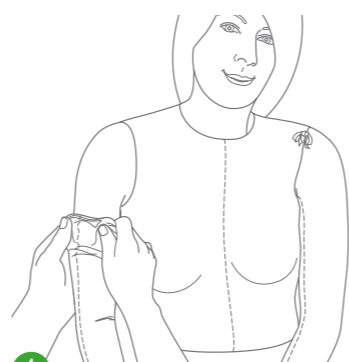


1

Zoals bij de vorige toepassing wordt de rompmaat gebruikt, en een stuk van de arm-maat. Dit stuk wordt op de arm gerold.

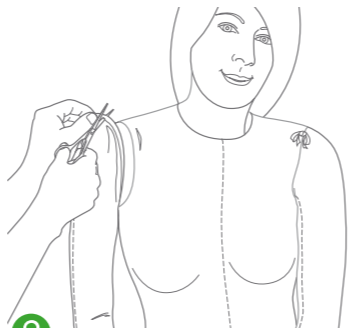

2


Onder en boven de arm wordt een stuk ingeknipt zodat er twee repen in het armstuk ontstaan. Aan de achter- en voorkant van het hemd worden gaten gemaakt, om de repen vast te zetten.

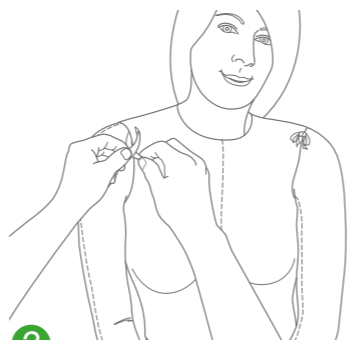

3


Haal de repen door de gemaakte gaten in de Tubifast 2-Way Stretch op de romp, zodat een ideaal hemd met mouwen ontstaat voor dermatologisch gebruik of gebruik als bescherming onder gips.

Heup

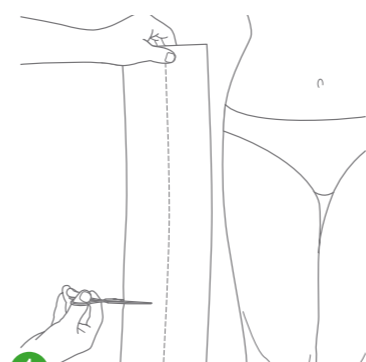

1

Neem een stuk Tubifast 2-Way Stretch van rompmaat af. Meet van taille tot dij, knip deze lengte af en knip een gat op ca. 15 cm vanaf de onderkant.

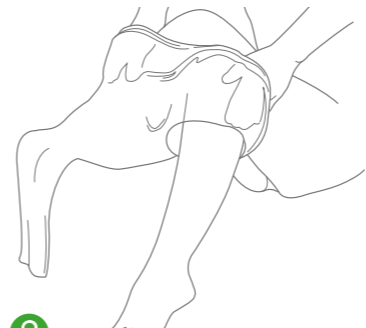

2


Breng Tubifast 2-Way Stretch over het aangetaste been aan en steek het andere been door het geknipte gat.



3


Tubifast 2-Way Stretch zal nu een wondverband op de heup goed in positie houden.

Hoofd

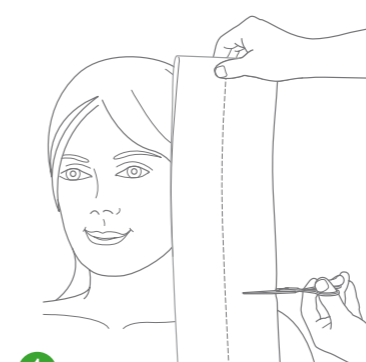


1

Meet vanaf de nek tot de bovenkant van het hoofd en verdubbel dit. Meet iets ruimer (3-4 cm) en knip af. Vouw in 2 gelijke helften en maak een gat op 5-6 cm vanaf onderkant 2-3 cm naar binnen toe.

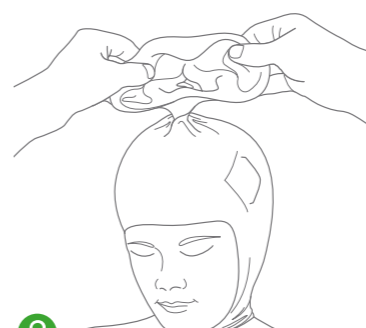

2

Trek over het hoofd, waarbij het gezicht door het gat gaat. Leg een draai in het resterende verband en herhaal de procedure met de tweede laag.

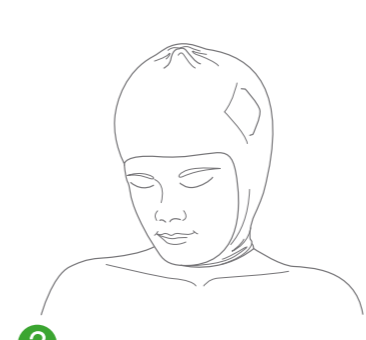

3

Het hoofdverband is nu klaar en het wondverband wordt goed op zijn plaats gehouden.

Perineum



1

Meet vanaf het middel tot de knie en knip af. Knip daarna een gat tot halverwege de Tubifast 2-Way Stretch op ca. 25 cm.



2

Tubifast 2-Way Stretch wordt omhoog getrokken, waarbij beide benen door het gat komen, met de resterende reep aan de achterkant.



3

De reep wordt tussen de benen door gehaald, en er worden gaten in het rompstuk gemaakt. De twee uiteinden van de reep worden door de gaten gehaald en vastgemaakt, waardoor het perineumverband op de juiste plaats blijft zitten.

Tubifast 2-Way Stretch

Tubifast 2-Way stretch is het eerste lichtgewicht, elastische buisverband dat zowel in de breedte als in de lengte meerekkt.⁽¹⁾ Dankzij deze unieke eigenschap hebben patiënten complete bewegingsvrijheid en extra comfort. Ideaal voor verbandfixatie en huidbedekking en maakt tape, verbandklemmen of veiligheidsspelden overbodig. Het is snel en eenvoudig aan te brengen en rafelt minder.

Dankzij de buisvorm is Tubifast 2-Way Stretch uitermate geschikt voor het fixeren van wondverbanden op moeilijke plaatsen zoals de stomp als gevolg van een amputatie.

Als u zich zorgen maakt over uw aandoening, of de aandoening verergert, stop dan met het gebruik en raadpleeg uw zorgverlener.

¹ Gepubliceerde data tonen aan dat Tubifast 2-Way Stretch de minimumeis m.b.t. rek in de lengte voor zitten en buigen overschrijft. Physical testing of textiles, B. P. Saville, Woodhead Publishing, 1999.
² Data on file.

Bestelinformatie voor Tubifast 2-Way Stretch

Art. nr.	REF. nr.	Breedte x lengte	Ledemaat	Inhoud verpakking	Inhoud overdoos	ZI-nr verpakking	ZI-nr per stuk	ZI-memocode
Roed								
9052480	2480	3,5 cm x 1 m	9 - 18 cm	12 st à 1 m	12 x 12 st	15383318	15414507	TUBIX1
9052434	2434	3,5 cm x 10 m	9 - 18 cm	1 rol à 10 m	48 x 1 st		15383393	TUBIX1
Groen								
9052481	2481	5 cm x 1 m	14 - 24 cm	12 st à 1 m	12 x 12 st	15383326	15414485	TUBIX1
9052436	2436	5 cm x 10 m	14 - 24 m	1 rol à 10 m	42 x 1 st		15383407	TUBIX1
Blauw								
9052482	2482	7,5 cm x 1 m	24 - 40 cm	12 st à 1 m	8 x 12 st	15383334	15414469	TUBIX1
9052438	2438	7,5 cm x 10 m	24 - 40 cm	1 rol à 10 m	30 x 1 st		15383423	TUBIX1
Geel								
9052483	2483	10,75 cm x 1 m	35 - 64 cm	12 st à 1 m	8 x 12 st	15383342	15414477	TUBIX1
9052440	2440	10,75 cm x 10 m	35 - 64 cm	1 rol à 10 m	18 x 1 st		15383431	TUBIX1
Paars								
9052479	2479	25 cm x 1 m	64 - 130 cm	12 st à 1 m	6 x 12 st	15383369	15414493	TUBIX1
9052444	2444	25 cm x 10 m	64 - 130 cm	1 rol à 10 m	20 x 1 st		15383458	TUBIX1



Distributie NL:

Medeco B.V. Postbus 1555 | 3260 BB Oud-Beijerland | Alexander Flemingstraat 2 | 3261 MA Oud-Beijerland
Telefoon (0186) 63 44 00 | Fax (0186) 61 68 93 | info@medeco.nl | www.medeco.nl