

Gaaskompres X-Ray niet steriel

Toepassing

Gaaskompressen met X-Ray draad worden toegepast bij operatieve ingrepen voor de absorptie van vocht. Door de X-Ray draad kan het product gelokaliseerd worden met behulp van röntgenstralen.

Operatie gazen zijn niet bedoeld om volledig uitgevouwen gebruikt te worden. Het aantal keer dat een gaas uitgevouwen mag worden hangt af van de afmeting en het aantal lagen. Zorg er altijd voor dat de onafgewerkte zijde van het gaas naar binnen omgevouwen blijft. De kans dat deze onafgewerkte zijde (de snijrand van het gaas) partikels afgeeft is namelijk aanwezig en dit is onwenselijk. Hoewel er geen officiële richtlijnen bekend zijn hiervoor, raden wij aan om deze werkwijze op te nemen in een werkinstructie.

Als u gazen uitgevouwen wilt gebruiken dan zijn hiervoor speciaal rondom gestikte gazen (zie buikgazen) ontwikkeld.

Productinformatie

- Vervaardigd van 100% zware kwaliteit katoen
- Rafelvrij gevouwen 17-draads geweven kompres
- Niet steriel; de gazen dienen nog gesteriliseerd te worden voor gebruik
- Voorzien van een blauwe röntgencontrastdraad (X-Ray draad) met een hoog barium sulfaatgehalte (>60%)



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3016720	KLINION GAASKOMPRES X-RAY 10 X 10 CM 12 LAGEN PER 50 STUKS REF 111180	50 st.	20 x 50 st.		
3016722	KLINION GAASKOMPRES X-RAY 10 X 20 CM 12 LAGEN REF 111209	50 st.	10 x 50 st.		