

Mesitran Soft - antibacteriële wondgel op basis van honing

Toepassing

Antibacteriële wondgel voor de behandeling van chronische wonden (o.a. Ulcus Cruris en Decubitus (stadium I-V), oncologische wonden en acute wonden (o.a. schaaf- en snijwonden, ontvellingen en 1e en 2e graads brandwonden).

Productinformatie

- Bestaat uit gesteriliseerde zuivere honing (40%), glycolgelbasis, Medilan (non-allergeen), vitamine C en E (anti-oxidanten)
- Wondgel is de milde vorm van L-Mesitran wondzalf voor het creëren van een vochtig wondmilieu (droge wonden) en ook voor het opvullen van de diepere wond.
- De hydro-actieve wondgel is tevens schimmeldodend en daardoor goed toepasbaar bij teen-, nagel- en vaginale schimmels
- WCS-wondclassificatie: zwarte, gele en rode fase, voor oppervlakkige en diepe wonden
- Mesitran Soft is uitstekend preventief antibacterieel toepasbaar en zorgt voor een snelle weefselregeneratie.
- L-Mesitran Soft kan in een wondopvullende hoeveelheid worden aangebracht en afgedekt met een wondverband of wondpleister
- Er zijn geen contra-indicaties en bijwerkingen bekend.
- Antibacterieel (bacteriocide)
- Schimmeldodend (fungicide)
- Necrose en fibrineus beslag oplozend
- Geurneutraliserend
- Ontstekingsremmend
- Creëert een vochtig wondmilieu
- Optimaliseert de wondgenezing
- Voorkomt verkleving van het wondverband
- Verbandwisseling 1 à 2 dagen

Verschillen wondgel met wondzalf

- De wondgel is gemakkelijker smeerbaar, terwijl de wondzalf een compacte samenstelling heeft
- De wondgel kan in grote hoeveelheden worden aangebracht, terwijl de wondzalf dun dient te worden aangebracht
- De wondgel is geschikt voor het opvullen van diepere wonden
- De wondgel veroorzaakt geen prikkeling in de wond, terwijl de wondzalf dat in enkele gevallen wel kan geven.

Aantal praktische (honing) gebruikstips:

- Bij acute wonden (schaaf-, snijwonden, ontvellingen) moet de wond altijd worden schoongespoeld en zand en vuil worden verwijderd. Er is een misverstand dat een ontsmettingsmiddel / antibacterieel middel daarvoor de oplossing is. Na deze reiniging het antibacteriële middel pas toepassen.
- Geïmpregneerde zalfgazen worden veel gebruikt, maar kleven aan de wond door uitdroging van o.a. wondvocht. Door de Mesitran zalf of gel daaronder aan te brengen krijg je een actieve wondbehandeling, werkt het preventief tegen infectie en hecht het niet meer aan de wond
- Elke wond verdient een snelle ongecompliceerde genezing, in een vochtig wondmilieu, goede bacteriële bescherming en een dun comfortabel verband. Bijvoorbeeld een eilandpleister (Kliniplast Border) met de toevoeging van de Mesitran zalf of gel doet veelal wonderen en biedt de patiënt veel comfort tegen lagere kosten.
- Vingertopletsels (bij kinderen!) behandelen met een vetgaas met Mesitran-gel en Singlefix, dat comfortabel de vinger beschermt (tegen stoten, vuil en bacteriën) en het verband optimaal fixeert.
- Onderzoek heeft aangetoond dat voetschimmels en schimmelnagels effectief zijn te bestrijden met de combinatie van Mesitran zalf en MycoCure.



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3017026	KLINION ADVANCED L-MESITRAN SOFT HONINGGEL 50GR REF 174706	1 st.	12 x 1 st.	15420094	MESIC
3036549	KLINION ADVANCED L-MESITRAN SOFT HONINGGEL 15GR REF 174705	1 st.	14 x 1 st.		