

Mesitran Zalf - antibacteriële wondzalf op basis van honing

Toepassing

Antibacteriële wondzalf voor de behandeling van chronische wonden (o.a. Ulcus Cruris en Decubitus (stadium I-V), oncologische wonden en acute wonden (o.a. schaaf- en snijwonden, ontvellingen en 1e en 2e graads brandwonden) en diverse schimmelinfecties (o.a. voet- en vaginale schimmels).

Productinformatie

- Antibacterieel (bacteriocide)
- Schimmeldodend (fungicide)
- WCS-wondclassificatie: zwarte, gele en rode fase. L-Mesitran is uitstekend preventief antibacterieel toepasbaar, zorgt voor een snelle weefselregeneratie en reduceert de vorming van littekenweefsel
- Er zijn geen contra-indicaties en bijwerkingen bekend. L-Mesitran dun aanbrengen en afdekken met een wondverband of wondpleister. bestaat uit gesteriliseerde honing (48%), medilan, calendula, aloë vera, zinkoxide en is verrijkt met vitamine A, C en E
- Necrose-oplossend
- Geurneutraliserend
- Ontstekingsremmend
- Creëert een vochtig wondmilieu
- Optimaliseert de wondheling

Verschillen wondzalf met wondgel

- De wondzalf heeft een compacte samenstelling, terwijl de wondgel gemakkelijker smeerbaar is
- De wondzalf dient dun te worden aangebracht, terwijl de wondgel in grote hoeveelheden kan worden aangebracht
- De wondgel is ook geschikt voor het opvullen van diepere wonden
- De wondgel veroorzaakt geen prikkeling in de wond, terwijl de wondzalf dat in enkele gevallen wel kan geven

Aantal praktische (honing) gebruikstips:

- Bij acute wonden (schaaf-, snijwonden, ontvellingen) moet de wond altijd worden schoongespoeld en zand en vuil worden verwijderd. Er is een misverstand dat een ontsmettingsmiddel / antibacterieel middel daarvoor de oplossing is. Na deze reiniging het antibacteriële middel pas toepassen.
- Geïmpregneerde zalfgazen worden veel gebruikt, maar kleven aan de wond door uitdroging van o.a. wondvocht. Door de Mesitran zalf of gel daaronder aan te brengen krijg je een actieve wondbehandeling, werkt het preventief tegen infectie en hecht het niet meer aan de wond.
- Elke wond verdient een snelle ongecompliceerde genezing, in een vochtig wondmilieu, goede bacteriële bescherming en een dun comfortabel verband. Bijvoorbeeld een eilandpleister (Kliniplast Border) met de toevoeging van de Mesitran zalf of gel doet veelal wonderen en biedt de patiënt veel comfort tegen lagere kosten.
- Vingertopletsels (bij kinderen!) behandelen met een vetgaas met Mesitran-gel en Singlefix, dat comfortabel de vinger beschermt (tegen stoten, vuil en bacteriën) en het verband optimaal fixeert.
- Onderzoek heeft aangetoond dat voetschimmels en schimmelnagels effectief zijn te bestrijden met de combinatie van Mesitran zalf en MycoCure.



Artikeloverzicht

| Bestelnr. | Omschrijving | Binnendoos | Overdoos | ZI-nummer | ZI-memo |
|-----------|---|------------|------------|-----------|---------|
| 3017022 | KLINION ADVANCED L-MESITRAN WONDZALF 50GR REF 174700 | 1 st. | 12 x 1 st. | 16771443 | |
| 3036571 | KLINION ADVANCED L-MESITRAN WONDZALF 20GR REF 174701 | 1 st. | 14 x 1 st. | 14799391 | |