

Eyewash Oogspoeling - wandhouderset

Toepassing

De wandhouder is stofdicht en bevat een spiegel. De Drop wandhouder is ook te gebruiken voor oogdouche 250ml.

Productinformatie

Gebruiksaanwijzing

Om DROP te openen, trekt u het transparante deksel lichtjes naar beneden. Neem een ??van de flessen, draai vervolgens aan de oogbeker dop, de verzegeling breekt, zodat u de oplossing kunt gebruiken. De anatomische oogkelk zorgt ervoor dat de oplossingsstraal correct wordt gericht, waardoor een efficiënte oogwas mogelijk is zonder verspilling. Na het wassen van uw oog kan de spiegel nuttig zijn om erachter te komen wat de uiteindelijke schade is.



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3034387	EYEWASH OOGSPOELING NACL 0,9% 500 ML MET WANDHOUDER 2 ST REF CPS683 *S*	1 st.	1 x 1 st.		
3034386	EYEWASH OOGSPOELVLOEISTOF NACL 0,9% 500 ML REF ACQ414 *S*	10 st.	1 x 10 st.		